

Carpe Diem^{TM/MC} Tb



Nettoyant pour surfaces prêt à l'emploi et désinfectant de niveau intermédiaire, virucide général, bactéricide et tuberculocide..

Nettoyant et désinfectant tout-en-un formulé avec une technologie propriétaire au peroxyde d'hydrogène pour donner une performance de nettoyage plus rapide et plus efficace.

Répond à toutes les normes de Santé du Canada pour nettoyer et décontaminer objets et surfaces souillés par du sang et des fluides corporels.

- Désinfection en 60 secondes
- Amélioration du nettoyage
- Respect de l'environnement
- Formule non corrosive

Mode d'emploi

SURFACES TRÈS SOUILLÉES NÉCESSITANT UN NETTOYAGE AVANT DÉSINFECTION DANS LE DOMAINE MÉDICAL DES APPAREILS NON CRITIQUES, ÉQUIPEMENTS ET SURFACES DURES NON POREUSES, entrant en contact avec de la peau intacte, comme l'extérieur de machines d'hémodialyse, stéthoscopes, dessus de tables, etc. Appliquer sur la surface avec chiffon ou serviette jetable. S'assurer que la surface reste humide pendant 1 minute à 20 °C. Essuyer ensuite la surface ou la rincer.

Instructions spéciales pour nettoyage et décontamination de VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et/ou VHC (virus de l'hépatite C) sur objets et surfaces souillés par sang/fluides corporels.

Ce produit est prévu pour utilisation contre VIH et/ou VHC uniquement dans des lieux où ces virus ont une probabilité d'être présents, comme les surfaces où il peut y avoir contamination par du sang ou des fluides corporels.



Carpe Diem^{TM/MC} Tb



Mode d'emploi (suite)

Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang et fluides corporels : Il faut porter des gants. Éliminer l'excès de sang et fluides corporels avec des matières absorbantes.

Nettoyage de zone contaminée : Appliquer sur la surface, laisser agir 30 secondes, essuyer. **Désinfection de zone contaminée :** Appliquer sur la surface en la maintenant humide pendant 1 minute à 20 °C. Essuyer ou rincer. **Protection individuelle :** Gants jetables, blouse, masque facial ou protection oculaire selon le cas, doivent être portés durant toutes les procédures de nettoyage, de fluides corporels et sang, et les procédures de décontamination. **Mise au rebut de matières infectieuses :** Les produits contaminés par sang et fluides corporels doivent être mis au rebut en conformité avec les réglementations locales, provinciales et nationales concernant les produits infectieux.

Désinfection à spectre large de surfaces n'entrant pas en contact avec des aliments : Appliquer sur la surface, en la gardant humide pendant 30 secondes. Essuyer, le rinçage n'est pas nécessaire. Les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à l'eau potable après leur désinfection. L'activité germicide de ce produit a été déterminée en conformité avec la norme CAN/CGSB-2.161-97 de l'Office des normes générales du Canada.

Spécifications

Ingrédient actif : Peroxyde d'hydrogène 0,5% - **N° norme DIN :** 02283530 (Serviettes), 02283522 (Liquide)

Couleur / Forme : Liquide incolore transparent - **pH :** 2,5 – 3,5 – **Odeur :** Inodore

Performance de nettoyage : Excellent – **Phosphates :** Aucun – **Densité :** (eau = 1) 1,01

PUISSANT DÉSINFECTANT CONTRE :

VIRUCIDE : Efficacité prouvée contre Poliovirus Type 1, souche Brunhilde (ATCC VR-1000) qui lui donne le statut de virucide général contre la plupart des virus enveloppés ou non enveloppés, HIV-1 virus de l'immunodéficience humaine (VIH), souche HTLV-IIIB (HIV-1), calicivirus félin (ATCC VR-782), comme substitut pour virus Norwalk et de type Norwalk • Coronavirus humain (ATCC VR-740) • Grippe A, souche de Hong Kong (ATCC VR-544) • Virus de l'herpès simplex, Type 1 (HSV-1) (ATCC VR-733) • Virus de l'herpès simplex, Type 2 (HSV-2) (ATCC VR-734) • Rhinovirus Type 37, souche 151-1 (ATCC VR-1147) • Rotavirus, souche WA • Virus de l'hépatite C (VHC)

BACTÉRICIDE : *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 15442)

- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Salmonella choleraesuis (ATCC 10708)
- Escherichia coli O157:H7 (ATCC 35150)
- Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33592)
- Gentamycin and Methicillin resistant (MRSA)
- Enterococcus faecalis VRE (ATCC 51575)
- Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)

DÉSINFECTANT À SPECTRE LARGE : *Klebsiella pneumoniae* (ATCC 4352)

- Salmonella choleraesuis (ATCC 10708)
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33592)
- Enterococcus faecalis VRE (ATCC 51575)
- Escherichia coli O157:H7 (ATCC 35150)

TUBERCULOCIDE : *Mycobacterium terrae* (ATCC 15755)

Données sur le produit

N° d'article :	Conditionnement :
4277306	12 bouteilles de 946 mL prêtes à l'emploi (avec 2 pulvérisateurs à gâchette par carton)
4444160	12 boîtes de 160 serviettes Dimensions des serviettes : 20 cm x 23 cm

** AHP, la marque commerciale et la technologie brevetée au peroxyde d'hydrogène sont des propriétés exclusives utilisées sous licence par Virox Technologies.

BUTCHERS[®]

The Butcher Company
Sturtevant, WI 53177-1964
www.butchers.com

BUTCHERS[®]
TECHSERVICE
800-225-9475